

TouchCare® insulino pompos sistema

Trumpas pradžiamokslis (mmol/l)



www.medtrum.com

Diabetas paprasčiau


Medtrum

Turinys

Belaidės insulino pompos sistemos apžvalga	1
Nuotolinio valdymo pulto (PDM) nustatymai (PDM Settings)	2
Bazės nustatymai (Basal Settings)	4
Boliuso nustatymai (Bolus Settings)	5
Naujo rezervuaro naudojimas (Start a new Patch)	6
Pompos ženklų paaiškinimai (Read Pump)	9
Laikina bazė (Temp Basal)	10
Boliuso nustatymas rankiniu būdu (Manual Bolus)	11
Maisto boliuso skaičiuoklė (Food Bolus Calculator)	12
Sustabdymas ir tęsimas (Suspend & Resume)	13
Rezervuaro išjungimas (Deactivate the Patch)	14
Įspėjimai ir skubios pagalbos rinkinys (Alerts & Emergency Kit)	15
Jūsų asmeniniai nustatymai (Your Personal Settings)	16


Belaidės insulino pompos sistemos apžvalga

Nuotolinio valdymo pultas (The Personal Diabetes Manager (PDM))

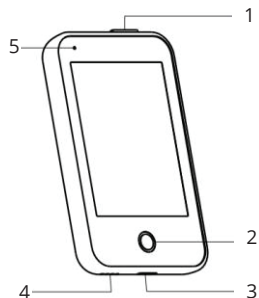


1. Maitinimo mygtukas
2. Pagrindinis mygtukas (programinės įrangos mygtukas)
3. Įkrovimo lizdas
4. Garsiakalbio anga
5. Indikatoriaus lemputė

Belaidė insulino pompa (Pump Base)

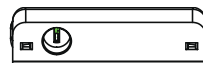


Rezervuaras (Reservoir Patch)

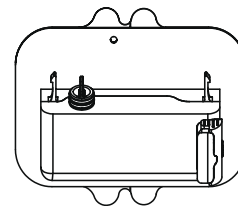

- Plona belaidė insulino pompa yra sudaryta iš daugkartinio naudojimo pompos (JN-026) ir vienkartinio rezervuaro (MD-JN-021), kuriame telpa iki 200 V insulino, kurio užtenka iki 3 dienų.
- Belaidė insulino pompa saugo insulino tiekimo nustatymus ir siunčia duomenis į nuotolinio valdymo pultą (PDM) per *Bluetooth* ryšį (ryšio diapazonas 4 metrai be blokavimo).
- Belaidė insulino pompa (sujungta pompa ir rezervuaras) yra atspari vandeniui 2,5 metro (8 pėdų) gilyje 60 minučių (IP28).
- Belaidę insulino pompą ir rezervuarą laikykite nuo -10°C (14°F) iki 55°C (131°F) temperatūroje.

Nuotolinio valdymo pulto (PDM) įkrovimas

Nuotoliniam valdymo pultui (PDM) įkrauti reikalingas kintamosios srovės adapteris, kurio įtampa yra 5,0 V DC

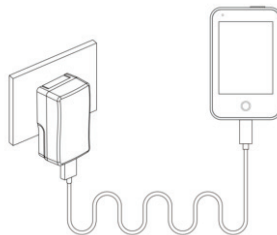


- Iki galo įkrautas
- Kraunamas
- Nekreunamas
- Akumuliatorius išsikrauna
- Akumuliatorius tuščias

Nuotolinio valdymo pulto (PDM) nustatymai (PDM Settings)

1. Įjunkite / išjunkite nuotolinio valdymo pultą (PDM)


- **Įjungti (Turn on):** paspauskite maitinimo mygtuką ir palaikykite, kol pradės mirksėti žalia lemputė.
- **Išjungti (Turn off):** maždaug 2 sekundes spauskite maitinimo mygtuką, tada slinkite į „išjungti“ padėtį. Arba ilgai spauskite maitinimo mygtuką, maždaug 8 sekundes.

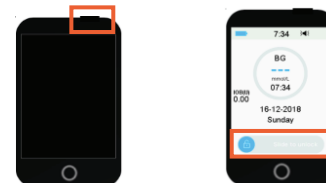

2. Pažadinkite nuotolinio valdymo pultą (PDM)


Kai ekranas pasidaro juodas, paspauskite maitinimo mygtuką ir slinkite, kad atrakintumėte ekraną.

3. Pasirinkite kalbą (Language) ir šalį (Country/Region)

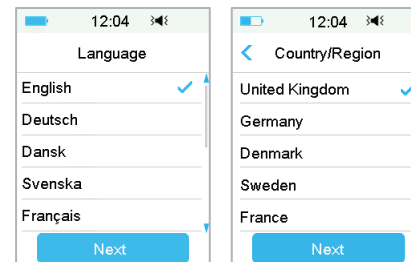

4. Nustatykite laiką ir datą (Time & Date)

Pastaba: Datą ir laiką galima pakeisti tik tada, kai neaktyvuotas rezervuaras.

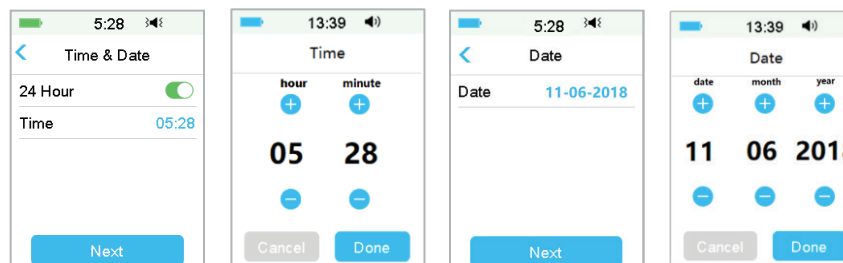

5. Boliuso skaičiuotuvas (Bolus Calculator)


Žr. 5 psl.

Nuotolinio valdymo pulto (PDM) nustatymai (PDM Settings)

6. Nustatykite garso parinktį (Audio options)

Main Menu → Settings → General → Audio Options


Jei nustatysite garso parinktį į Audio off / Vibrate off (Garsas išjungtas / Vibracija išjungta), jūsų nuotolinio valdymo pultas (PDM) vibruos tik tada, kai bus gaunamas rimto pavojaus signalas.

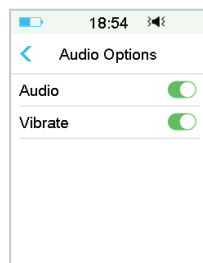

7. Atlikite ekrano (Display) nustatymus



Main Menu → Settings → General → Display

Naujiems vartotojams rekomenduojama nustatyti 2 minučių foninio apšvietimo laiką.

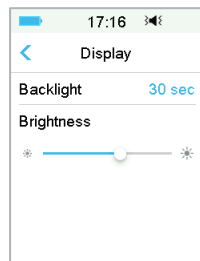

8. Raskite belaidės insulino pompos (Pump Base) serijos numerį SN


Belaidės insulino pompos SN rasite ant gaminio dėžutės arba insulino pompos galinėje pusėje.

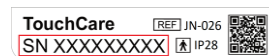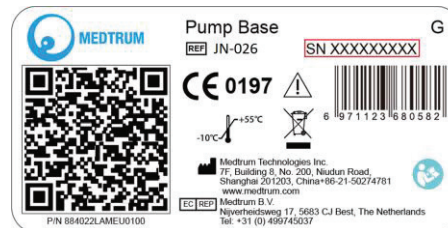

9. Įveskite belaidės insulino pompos serijos numerį SN (Pump Base SN)

Main Menu → Patch → Pump Base SN

Bakstelėkite -----, norėdami įvesti SN rankiniu būdu.

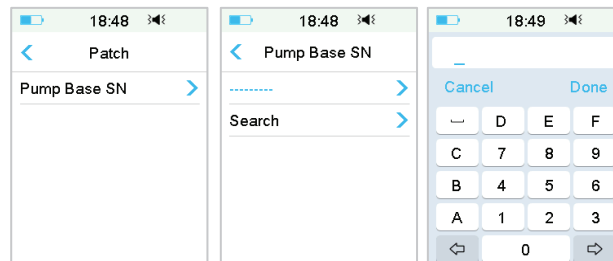

Bazės nustatymai (Basal Settings)

Main Menu → Settings → Insulin Pump → Basal Setup

1. Maksimali bazė (Max Basal)

Norėdami redaguoti, paspauskite Max Basal (Maksimali bazė)

2. Redaguoti bazės modelį (Basal Pattern)

1. Paspauskite Edit Basal (Redaguoti bazę), tada pasirinkite modelį (Select Pattern), kurį norite redaguoti

2. Nustatykite bazės greitį

- Norėdami nustatyti bazės greitį, bakstelėkite mėlyną U/H (U/val.) laukelį.
- Galite nustatyti bazės greitį nuo 0 iki didžiausio, didindami kas 0,05 U/H.

3. Pridėkite laiko segmentą (Add Time Segment)

- Norėdami pridėti naują segmentą, bakstelėkite +Add Time Segment (Pridėti laiko segmentą).
- Kiekvienai dienai galite nustatyti iki 48 segmentų.

4. Ištrinkite laiko segmentą (Delete)

- Braukite į kairę atsistoję ant kiekvieno segmento, tuomet paspauskite Delete (Ištrinti). Kito segmento pradžios laikas bus pakoreguotas.
- Norėdami atšaukti ištrynimą, braukite ant segmento atgal į dešinę.




5. Norėdami peržiūrėti visus segmentus, slinkite aukštyn ir žemyn

6. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte nustatymus

Pastaba: Dar kartą patikrinkite visus įvestus skaičius, kad įsitikintumėte, kad jie nurodyti teisingai.

3. Bazės modelio pasirinkimas (Basal Pattern)

Main Menu → Basal → Select Pattern

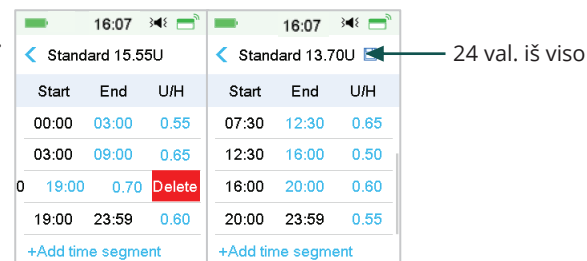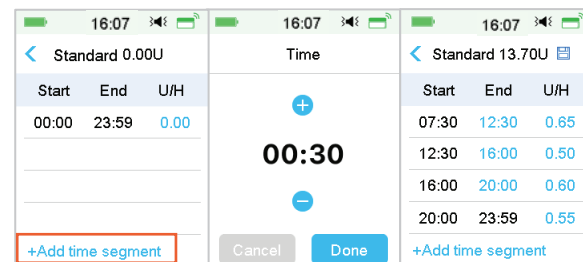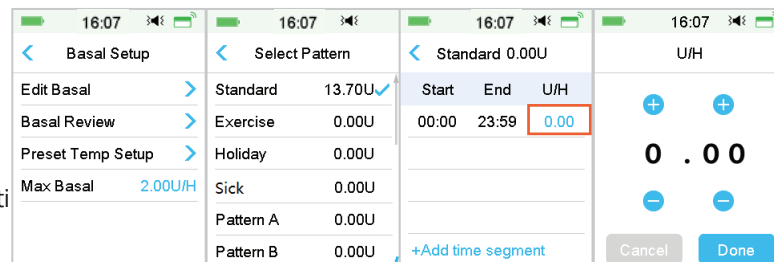


Boliuso nustatymai (Bolus Settings)

Main Menu → Settings → Insulin Pump → Bolus Setup

1. Maksimalus boliusas (Max Bolus)

Norėdami jį redaguoti, paspauskite Max Bolus (Maksimalus boliusas)

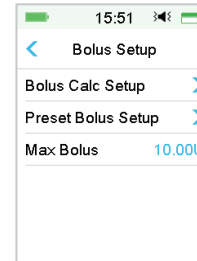


2. Nustatykite boliuso skaičiuotuvą (Bolus Calculator)

- Įjunkite / išjunkite boliuso skaičiuotuvą (Bolus Calculator)
- Nustatykite IC santykį (IC Ratios)
- Nustatykite jautrumą insulinui (Insulin Sensitivity)
- Nustatykite tikslinę glikemiją (BG Target)
- Nustatykite aktyvaus insulino organizme laiką (IOB Time – Active Insulin Time)

17:02	13:13	14:54	14:52
< Bolus Calculator	< IC Ratios	< Insulin Sensitivity	< BG Target
Bolus Calculator ☒	Start Insulin Carbs	Start Insulin BG	Start Low High
IC Ratios >	(hh:mm) (U) (g)	(hh:mm) (U) (mmol/L)	(hh:mm) (mmol/L) (mmol/L)
Insulin Sensitivity >	00:00 1 13	00:00 1 2.6	00:00 5.6 6.8
BG Target >	06:00 1 9.0	06:00 1 3.0	06:00 5.6 6.8
IOB Time 03:00			
	+Add time segment	+Add time segment	+Add time segment

3. Įprastas, išstėstas ir kombinuotas boliusas (Normal, Extended and Combo Bolus)


Pastaba: Prieš leidžiant kombinuotą / išstėtą boliusą (Combo bolus / Extended bolus), svarbu pasitarti su savo sveikatos priežiūros specialistu. Prieš svarstydami šias parinktis, turėtumėte susipažinti su pagrindinėmis nuotolinio valdymo pulto funkcijomis.

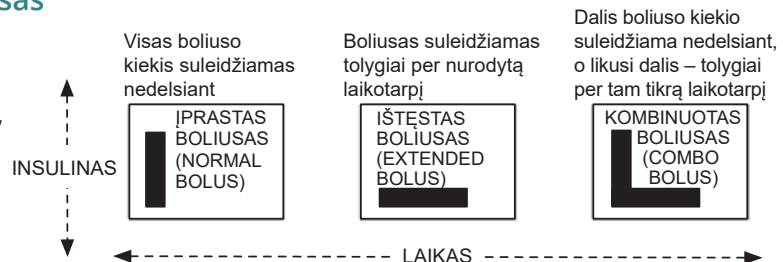

Naujo rezervuaro naudojimas (Start a new Patch)

1 Pasirinkite infuzijos vietą


- Švari, mažai plaukuota, mažai prakaituojanti, su pakankamai storu riebaliniu sluoksniu (mažiausiai 5 mm storio), toliau nuo bambos.
- Nauja infuzijos vieta turi būti bent 2,5 cm (1 colio) atstumu nuo paskutinės pasirinktos pompos pritvirtinimo vietos.
- Jei pasirinkote infuzijos vietą ant pilvo, nugaros ar sėdmenų srityje, rezervuarą klijuokite horizontaliai.
- Jei pasirinkote infuzijos vietą ant žasto arba šlaunies, rezervuarą klijuokite vertikaliai.

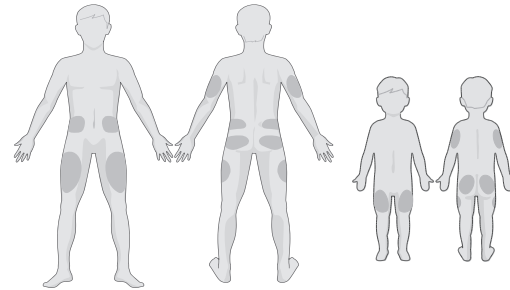

Pastaba: Atkreipkite dėmesį į jutiklio ir belaidės insulino pompos vietos vietą, kad nekiltų ryšio problemų.

2 Paruoškite infuzijos vietą


- Nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu.
- Nuvalykite infuzijos vietą alkoholiu suvilgytu tamponu, kad geriau priliptų.
- Leiskite odai visiškai išdžiūti.

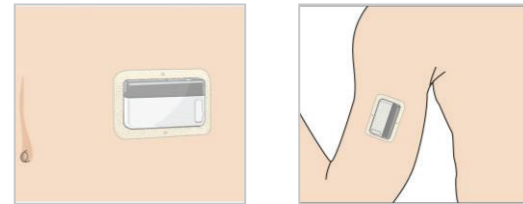

3 Sujunkite belaidę insulino pompą ir rezervuarą

Main Menu → Patch → New Patch Vykdysite ekrane pateikiamas instrukcijas

Prikljuokite dvipusę juostą ant pompos pagrindo (Pump base) apačios.

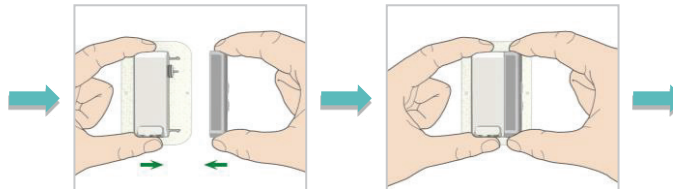

Patikrinkite pompos lemputes ir vibraciją.





Naujo rezervuaro naudojimas (Start a new Patch)

5 Užpildykite naują rezervuarą

Su savo sveikatos priežiūros specialistu nuspręskite, kiek insulino (70 V–200 V) turite sušvirkšti į rezervuarą.


Įspėjimas: Patikrinkite, kad neliktų oro rezervuaro užpildymo angoje. Taip atsitikus gali būti netyčia paleistas arba nutrauktas insulino tiekimas.

1. Įstumkite oro į buteliuką.
2. Pripildykite švirkštą insulinu.

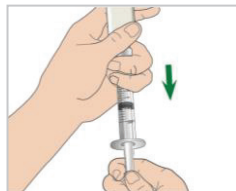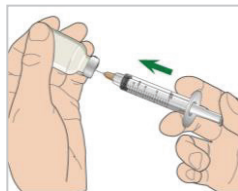

Pašalinkite orą


3. Laikykite švirkštą vertikaliai, o adatą laikykite užpildymo angoje. Įtraukite stūmoklį, kad pašalintumėte oro burbuliukus.

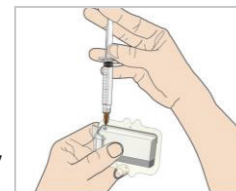

4. Spauskite stūmoklį, kol adatos gale pamatysite insulino lašelį.





5. Lėtai užpildykite rezervuarą insulinu.

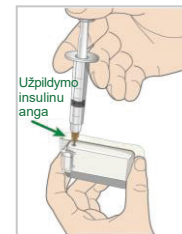


6 Paruoškite pompą




Paspauskite mygtuko dangtelį.
Palikite mygtuko dangtelį, kol paruošimas bus baigtas.

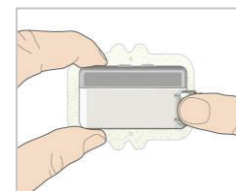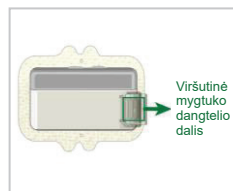

Naujo rezervuaro naudojimas (Start a new Patch)

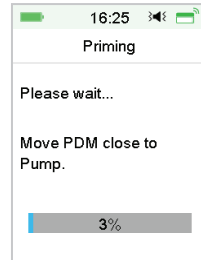


Paruošimas trunka apie 3 min.

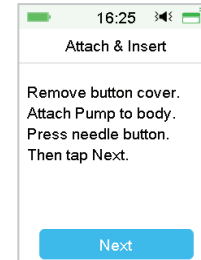


7 Uždėkite rezervuarą


1. Nuimkite mygtuko dangtelį.

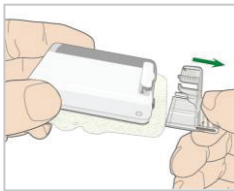


2. Pašalinkite lipnią apsauginę plėvelę.

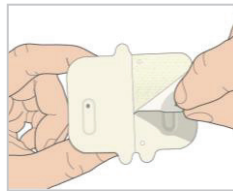




3. Prispauskite pompą prie odos.

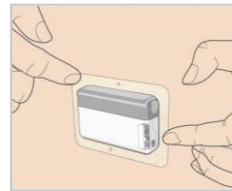

4. Vienu greitu judesiu paspauskite adatos mygtuką, kad įdurtumėte adatą.

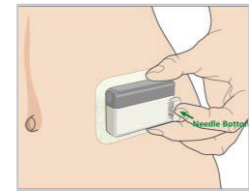


8 Pradėkite insulino tiekimą

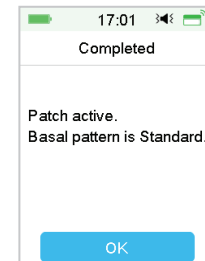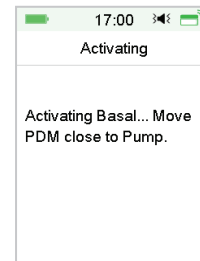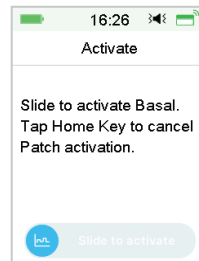

Pompos ženklų paaiškinimai (Read Pump)


Pradinis ekranas

1. Insulino tiekimo būseną
2. Aktyvus insulinas organizme (IOB)
3. Tiekimo informacija
4. Pompos radijo signalas
5. Likęs rezervuare insulinas
6. Pavojaus signalas / įspėjimas

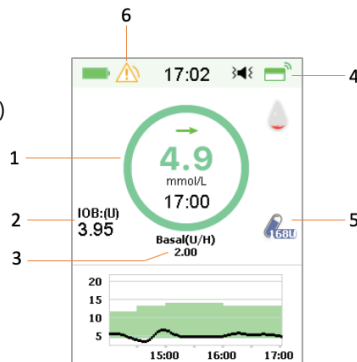


Pompos būseną (Pump Status)

Norėdami pereiti į pompos būsenos ekraną, slinkite pagrindiniame ekrane iš kairės į dešinę

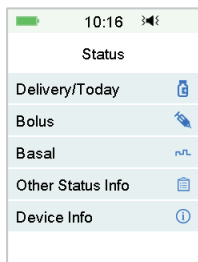


Pagrindinis meniu

Slinkite pagrindiniame ekrane iš dešinės į kairę, kad patektumėte į pagrindinį meniu

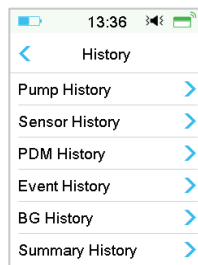

Istorija (History)

Main Menu → History

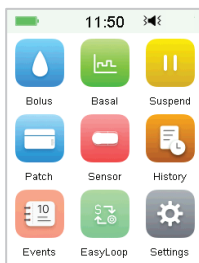

Tiekimo būklė

Piktograma	Forma ir spalva	Aprašymas
	Pilkas žiedas	Pilkas žiedas rodo, kad pompa nėra aktyvi.
	Žalias žiedas	Žalias žiedas reiškia, kad tiekama bazė.
	Žalias ir tamsiai žalias žiedas	Žalias ir tamsiai žalias žiedas reiškia, kad tiekama laikina bazė. Tamsiai žalia spalva nurodo laikinos bazės tiekimo eigą.
	Mėlynas ir tamsiai mėlynas žiedas	Mėlynas žiedas simbolizuoja įprastą boliusą, tamsiai mėlyna spalva nurodo tiekimo eigą.
	Violetinis ir tamsiai violetinis žiedas	Violetinis ir tamsiai violetinis žiedas simbolizuoja ištęstą boliusą, tamsiai violetinė spalva nurodo tiekimo eigą.
	Raudonas žiedas	Raudonas žiedas reiškia, kad tiekimas sustabdytas.

Laikina bazė (Temp Basal)

Aktyvuokite laikiną bazę (Temp Basal)

Main Menu → Basal → Temp Basal

Pasirinkus laikiną bazę (Temp Basal), galite trumpam reguliuoti bazinio insulino tiekimą

Pasirinkite bazės tipą, greitį ir trukmę

18:25	18:26	18:26
Temp Basal	Temp Basal	Temp Basal
Current Basal 0.70U/H	Current Basal 0.70U/H	Start End U/H
Rate(U/H) Percent	Rate(U/H) Percent	18:26 20:56 0.55
Rate(U/H) 0.40	Percent 80%	
Duration 04:00	Duration 02:30	
Next	Next	Slide to activate

Atšaukite laikiną bazę (Cancel Temp Basal)

Main Menu → Basal → Cancel Temp Basal

10:43
Basal
Cancel Temp Basal

Nustatykite iš anksto numatytą laikiną bazę (Preset Temp Basal)

Main Menu → Settings → Insulin Pump → Basal Setup → Preset Temp Setup

Aktyvuokite iš anksto numatytą laikiną bazę (Preset Temp Basal)

Main Menu → Basal → Preset Temp Basal

11:00	11:00
Preset Temp Setup	Preset Temp Basal
Heavy Ex	Heavy Ex 0.70U/H
Medium Ex	Medium Ex 85%
Light Ex	Light Ex 0.90U/H
Sick	Sick 0.70U/H
Temp 1	Temp 1 1.00U/H
Temp 2	Temp 2 140%

Boliuso nustatymas rankiniu būdu (Manual Bolus)

1 Main Menu → Bolus → Manual bolus

18:43

< Bolus

Bolus Calculator >

Manual Bolus >

Preset Bolus >

2 Nustatykite boliuso dozę (Set Bolus)

4:47

< Manual Bolus

Set Bolus

0.00U

Type

Normal Bolus

IOB: 0.00U

Next

3 Nustatykite boliuso tipą (Type)

4:49

< Type

Normal Bolus ✓

Extended Bolus

Combo Bolus

Įprastas boliusas (Normal Bolus)

Ištemptas boliusas (Extended Bolus)
Nustatykite trukmę (Duration)

Kombinuotas boliusas (Combo Bolus)
Bakstelėkite mėlyną / violetinį pliuso ženklą, kad nustatytumėte įprasto boliuso dalies (Normal) ir ištempto boliuso dalies (Extended) proporcijas. Nustatykite trukmę (Duration)

4 Braukite per ekraną, kad pradėtumėte boliuso leidimą

13:02

< Manual Bolus

Start Bolus?

4.00U

Slide to deliver

13:03

Manual Bolus

Bolus: 0.25U

Total: 4.00U

Slide to stop

13:03

< Manual Bolus

Extended: 4.00U

Duration

01:00

Next

13:04

< Manual Bolus

Start Bolus?

Extended: 4.00U

Duration 01:00

Slide to deliver

13:05

< Manual Bolus

Set Bolus 4.00U

Normal: 2.00U 50% Extended: 2.00U 50%

Duration 00:30

Next

13:05

< Manual Bolus

Start Bolus?

Total: 4.00U

Normal: 50% 2.00U

Extended: 50% 2.00U

Duration 00:30

Slide to deliver

Maisto boliuso skaičiuoklė (Food Bolus Calculator)

1 Main Menu → Bolus → Bolus Calculator

18:43

< Bolus

- Bolus Calculator >
- Manual Bolus >
- Preset Bolus >

2 Įveskite glikemijos (BG) arba angliavandenių (Carbs) arba abiejų duomenis

13:07

< Bolus Calculator

BG: 0.30U

7.8 mmol/L

Carbs: 4.40U

40 g

Next

3 Nustatykite boliuso dozę (Set Bolus) ir boliuso tipą (Type)

13:07

< Bolus Calculator

Set Bolus: **4.70 U**

Type: **Normal Bolus**

Suggested: 4.70U

IOB: 0.60U

Next

Įprastas boliusas (Normal Bolus)

13:08

< Bolus Calculator

Start Bolus?

4.70U

Slide to deliver

4 Braukite per ekraną, kad pradėtume boliuso leidimą

13:08

Bolus Calculator

Bolus: 0.30U

Total: 4.70U

Slide to stop

Iššėstas boliusas (Extended Bolus)
Nustatykite trukmę (Duration)

13:12

< Bolus Calculator

Extended: 4.70U

Duration: **00:30**

Next

13:12

Bolus Calculator

Start Bolus?

Extended: 4.70U

Duration: 00:30

Slide to deliver

Kombinuotas boliusas (Combo Bolus)
Bakstelėkite mėlyną / violetinį pluso ženklą, kad nustatytumėte įprasto boliuso dalies (Normal) ir iššėsto boliuso dalies (Extended) proporcijas. Nustatykite trukmę (Duration)

15:40

< Bolus Calculator

Set Bolus: 4.70U

+ — +

Normal: 2.35U 50% Extended: 2.35U 50%

Duration: **00:30**

Next

15:41

Bolus Calculator

Start Bolus?

Total: 4.70U

Normal: 50% 2.35U

Extended: 50% 2.35U

Duration: 00:30


Slide to deliver

Sustabdymas ir tęsimas (Suspend & Resume)



Sustabdyti (Suspend)

Main Menu → Suspend




Tiekiamas boliusas (Bolus)

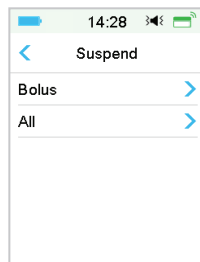

Boliusas (Bolus)

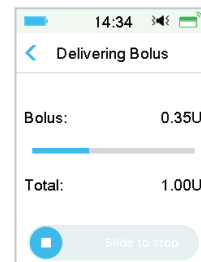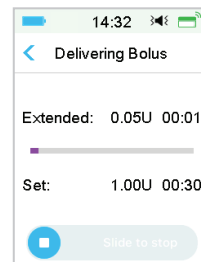


Visi (All)

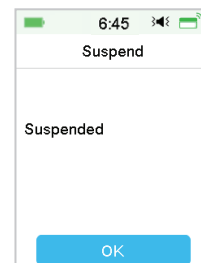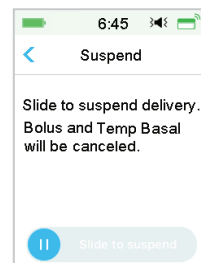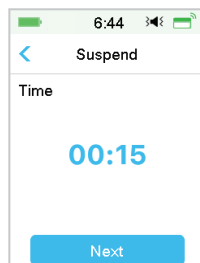

Boliusas netiekiamas

Tęsti tiekimą (Resume)


Main Menu → Resume

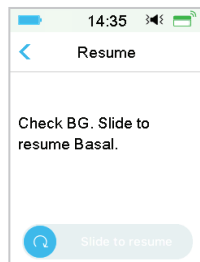

Rezervuaro išjungimas (Deactivate the Patch)

1 Išjunkite rezervuarą (Deactivate the Patch)

Menu → Patch → Deactivate Patch

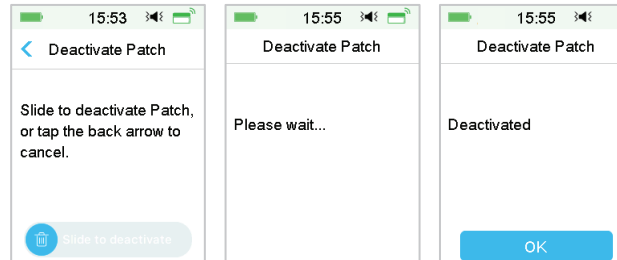

2 Pašalinkite rezervuarą

- Paspauskite ir palaikykite adatos atpalaidavimo mygtuką, esantį rezervuaro šone, tada stumkite jį rodyklės kryptimi, kad išimtumėte adatą.
- Švelniai nuimkite visą pompą. Jei reikia, naudokite medicininių klijų valiklį arba aliejų kūdikiams.
- Sulenkite lipnų pagrindą ir nuimkite dvipusę juostelę.
- Paspauskite ir palaikykite du atpalaidavimo mygtukus, esančius priešingose pompos pagrindo pusėse, tada traukite pompą, kad nuimtumėte ją nuo rezervuaro.



[spėjimas]: Nuėmę rezervuarą nuo odos paviršiaus, daugiau nemėginkite spausti adatos mygtuko. Taip darydami galite susižaloti.

Įspėjimai ir skubios pagalbos rinkinys (Alerts & Emergency Kit)

Įspėjimai



Nuotolinio valdymo pulto (PDM) pranešimai	Veiksmai, kurių reikia imtis
SUSTABDYMO PABAIGA (END OF SUSPEND)	Patikrinkite glikemiją (BG). Tęskite bazę, jei būtina.
MAŽAS LIKUTIS REZERVUARE (LOW RESERVOIR)	Greitai pakeiskite rezervuarą.
POMPOS TINKAMUMO LAIKAS BAIGSIS PO 1 VALANDOS (PATCH EXP IN 1 HOUR)	Greitai pakeiskite pompą.
POMPOS AKUMULIATORIAUS ĮKROVA SENKA (PATCH BATTERY LOW)	Greitai pakeiskite pompą.

Įspėjimai (vidutinės svarbos)



Nuotolinio valdymo pulto (PDM) pranešimai	Veiksmai, kurių reikia imtis
POMPOS GALIOJIMAS BAIGĖSI (PATCH EXPIRED)	Pakeiskite pompą. Patikrinkite gliukozės kiekį kraujyje.
REZERVUARAS TUŠČIAS (EMPTY RESERVOIR)	Pakeiskite rezervuarą. Patikrinkite gliukozės kiekį kraujyje.
VIRŠYTA MAX TDD (EXCEEDS MAX TDD)	Pakeiskite pompą. Patikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Patikrinkite istoriją.

Įspėjimai (aukšto prioriteto)



Nuotolinio valdymo pulto (PDM) pranešimai	Veiksmai, kurių reikia imtis
NUSTATYTAS UŽSIKIMŠIMAS (OCCLUSION DETECTED)	Pakeiskite pompą. Patikrinkite gliukozės kiekį kraujyje.
POMPOS KLAIDA (PATCH ERROR)	Pakeiskite pompą. Patikrinkite gliukozės kiekį kraujyje.
POMPOS PAGRINDO KLAIDA (PUMP BASE ERROR)	Nuimkite pompą. Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. Patikrinkite gliukozės kiekį kraujyje.

Skubios pagalbos rinkinys

Visada su savimi turėkite skubios pagalbos rinkinį, kad būtumėte tikras, jog turite būtinų atsargų. Informuokite šeimos narį, bendradarbį ir (arba) draugą, kur laikomas šis skubios pagalbos rinkinys.

Šiame rinkinyje turėtų būti, bet tuo neapsiribojant:

- Greitai veikiančios gliukozės tabletės arba gelis
- Glikemijos stebėjimo priemonės
- Šlapimo ketonų tyrimo priemonės
- Insulino švirkštas
- Greito veikimo U-100 insulinas
- *Extra Medtrum* 2,0 ml rezervuarai
- Akumulatorius
- Jūsų sveikatos priežiūros specialisto nurodymai, kiek insulino suleisti, jei pompos tiekimas nutraukiamas
- Spiritinės servetėlės
- Gliukagono skubios pagalbos rinkinys
- Skubiosios pagalbos telefono numeriai
- Jei keliaujate, sveikatos priežiūros specialisto raštas oro linijų saugumo tarnyboms

Jūsų asmeniniai nustatymai (Your Personal Settings)

Maksimali bazė (Max Basal Rate): _____ U/val.			
Bazės modelio pavadinimas (Basal Pattern Name): _____			
Pradžios laikas (Start Time)	Norma (U/val.) (Rate (U/H))	Pradžios laikas (Start Time)	Norma (U/val.) (Rate (U/H))
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	

Bazės modelio pavadinimas (Basal Pattern Name): _____			
Pradžios laikas (Start Time)	Norma (U/val.) (Rate (U/H))	Pradžios laikas (Start Time)	Norma (U/val.) (Rate (U/H))
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	
:		:	

Vardas (Name)	Greitis (Rate)	Trukmė (Duration)
Sunkus fizinis krūvis (Heavy Exercise)	_____ % arba _____ U/val.	:
Vidutinis fizinis krūvis (Medium Exercise)	_____ % arba _____ U/val.	:
Lengvas fizinis krūvis (Light Exercise)	_____ % arba _____ U/val.	:
Liga (Sick)	_____ % arba _____ U/val.	:
Laikinas 1 (Temp 1)	_____ % arba _____ U/val.	:
Laikinas 2 (Temp 2)	_____ % arba _____ U/val.	:
Laikinas 3 (Temp 3)	_____ % arba _____ U/val.	:

Jūsų asmeniniai nustatymai (Your Personal Settings)

I:C santykis (Ratio)	
Pradžios laikas (Start Time)	I:C (g angliavandenių) (g Carb)
:	1 U : _____ g
:	1 U : _____ g
:	1 U : _____ g
:	1 U : _____ g
:	1 U : _____ g
:	1 U : _____ g
:	1 U : _____ g
:	1 U : _____ g

Tikslinė glikemija (BG Target) (mmol/l)		
Pradžios laikas (Start Time)	Apatinė riba (Low Limit)	Viršutinė riba (High Limit)
:		
:		
:		
:		
:		
:		
:		
:		

Jautrumas insulinui (Insulin Sensitivity)	
Pradžios laikas (Start Time)	JIF (ISF) (mmol/l)
:	1 U : _____ mmol/l
:	1 U : _____ mmol/l
:	1 U : _____ mmol/l
:	1 U : _____ mmol/l
:	1 U : _____ mmol/l
:	1 U : _____ mmol/l
:	1 U : _____ mmol/l
:	1 U : _____ mmol/l

Maksimalus boliusas (Max Bolus): _____ U

Aktyvaus insulino laikas (Active Insulin Time): _____ : _____

Medicininės paskirties prietaisas.
Prieš naudodami, perskaitykite
naudotojo vadovą ir pasitarkite
su specialistu.

Ilgaliotas atstovas
UAB „Linus Medical“,
Ukmergės g. 223, Vilnius
Tel. 8 630 30222
pagalba@linusmedical.com



Medtrum Technologies Inc.
7F, Building 8, No. 200, Niudun Road
Shanghai 201203, Kinija
Tel: +86-21-50274781
Fax: +86-21-50274779



Medtrum B.V.
Nijverheidsweg 17
5683 CJ Best
Nyderlandai
Tel: +31(0) 499745037



Šis gaminys atitinka 93/42/EEB (MDD)
direktyvą ir 2014/53/ES (RED) direktyvą.

SY-018
IM881116WW-002
348459
Version:1.02

Diabetas paprasčiau

Medtrum